

Cet accessoire permet de maintenir le mufler de l'animal en hauteur et parallèle au corps.

Immobilisé dans cette position, il est aisé de le faire déglutir sans perte de produit nécessaire au soin (liquides nutritionnels, bolus antiparasitaire, aimants stomacaux ou vérification d'identité sanitaire précise : boucle d'oreille des vaches laitières).

Ce travail peut être réalisé par un seul intervenant.

Composition :

Le relève tête bétail Vink est constitué d'une armature tubulaire métallique à l'intérieur de laquelle est fixée une large gouttière.

Sécurité :

- Ce support s'utilise sur vaches laitières écornées.

Assemblage (voir schéma) :

Placer la gouttière dans l'encadrement métallique. Serrer les deux écrous sur le cadre puis positionner la gouttière. Mettre les autres écrous freins sans les bloquer pour permettre d'actionner le levier. Introduire les deux crochets supérieurs jusqu'à l'encliquetage du ressort muni d'un ergot.

Mode d'emploi :


Bloquer les vaches laitières écornées devant une mangeoire équipée de cornadis auto-bloquants ou à verrouillage collectif manuel. Placer le support de tête devant la vache nécessite une intervention.

Placer le cadre en forme de U sous le cou de l'animal. Suspendre le relève tête sur le tuyau supérieur du cornadis. Soulever la tête de la vache dans la position souhaitée puis fixer l'appareil à l'aide de la chaînette. Le positionnement est facilité lorsque la vache s'avance franchement côté mangeoire. L'opérateur choisira le moment opportun.

Ainsi, l'opérateur applique les soins en toute quiétude et efficacité.

Relève tête bétail VINK VI01

- Dimensions : 84 x 44 x 24,5 cm
- Poids : 10,44 kg
- Idéal pour administrer des médicaments à l'animal en toute sécurité

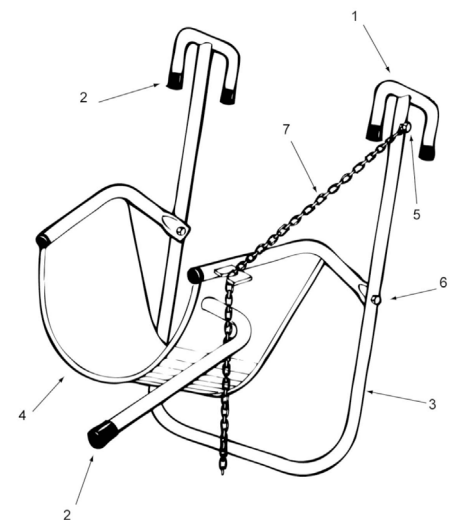

VI01

Pièces détachées :

1. Crochets
2. Embout nylon 27mm
3. Armature
4. Gouttière
5. Fixation pour chaîne
6. Fixation pour armature
7. Chaînette